

“貝斯美德”誘發型肺量計 “Besmed” Incentive Spirometer

衛署醫器製字第 003427 號

健保碼: RRB0293100EF

使用前請務必詳閱本使用說明書並遵照指示使用

型號: TB-93100

包裝: 1pc/pkg、12pcs/cs、48pcs/box。

產品用途:


適用胸腔、上腹及其他外科手術後，

訓練並幫助患者達到肺部擴張練習之器材。




操作方法:

1. 準備

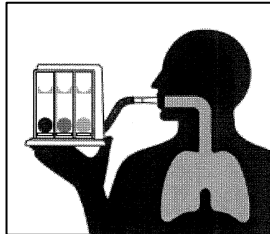


- * 身體坐直
- * 將訓練器直立握住
- * 正常吐氣
- * 用口緊密含住咬嘴
注意是否須配戴假牙
協助咬合

2. 做一次深呼吸

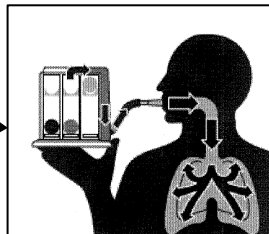


- * 做一次緩慢的深呼吸
- * 維持緩慢的速度吸氣
- * 保持將第一個球吸起
- * 盡可能保持 3 秒鐘
- * 吐氣放鬆
- * 可重複以上動作

3. 加快吸氣速度

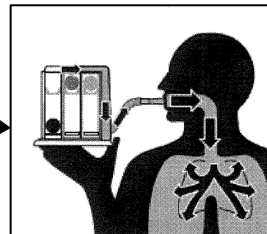

- * 加快深呼吸的速度
- * 維持速度繼續吸氣
- * 保持將第二個球吸起
- * 盡可能保持 3 秒鐘
- * 吐氣放鬆
- * 可重複以上動作
- * 試著將第三個球吸起

4. 吐氣放鬆

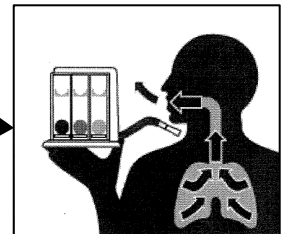

- * 視個人狀況重複 2/3 步驟後吐氣放鬆
- * 將咬嘴移開
- * 自然呼吸
- * 依照醫護人員建議之訓練目標及次數練習

產品特點:

1. 每組器材包括: PS 主體、ABS 球、EVA 延長管、PP 咬嘴。
2. 肺量計主體腔容量: 600ml/sec、900ml/sec 及 1200ml/sec (誤差範圍 < 5%)。
3. 主體腔內色球提供目測的檢視。
4. 儲存及運輸溫度: -4°F to 140°F (-20°C to +60°C)。
5. 本產品經 SGS 檢驗不含塑化劑, 請安心使用。
6. 請勿將此產品使用於不同病患間, 這可能會造成交互感染。勿將此產品置於潮溼或日光照射的地方。

“貝斯美德”誘發性肺量計

代理商: 安適醫療器材股份有限公司

電話: 02-2550-5830

許可證: 衛署醫器製字第 003427 號

製造商: 貝斯美德股份有限公司

製造商地址: 新北市五股區五工二路 116 巷 5 號